

Synthèse des données VEN fournies cf. 81107		is@Ddom		ResMed		Philips		Löwenstein
		Colonne	Info-bulle	XML	API	XML	API	
Evènements	IAH actuel dans Isadom	IAH	IAH	ahi	respEvents AHI	<Statistic Name="Apnea/Hypop<div>AHI		AHI_with_cHI_events_hour
	IAH par heure sans hypopnées centrales	IAH - HC	IAH sans hypopnées centrales	ahi	respEvents AHI	<Statistic Name="Apnea/Hypop<div>AHI		ahi_events_hour
	IAH avec hypopnées centrales	IAH + HC	IAH avec hypopnées centrales					AHI_with_cHI_events_hour
	IAH obstructifs	IAHO	IAH obstructifs					oAhi_events_hour
	Index d'apnées obstructives	IAO	Index d'apnées obstructives	oai	respEvents OAI			oAi_events_hour
	Index d'hypopnées obstrutives	IHO	Index d'hypopnées obstrutives					oHI_events_hour
	IAH centraux	IAHC	IAH centraux					cAhi_events_hour
	Index d'apnées centrales	IAC	Index d'apnées centrales	cai	respEvents CAI	Clear Airway Apnea Index	ClearAirwayApnea	cAi_events_hour
	Index d'hypopnées centrales	IHC	Index d'hypopnées centrales					cHI_events_hour
	Evènements non qualifiés	ENQ	Evènements non qualifiés	uai	respEvents UAI			uAI_events_hour
	Index d'apnées	IA	Index d'apnées	ai	respEvents AI			ai_events_hour
	Index d'hypopnées	IH	Index d'hypopnées	hi	respEvents HI			oHI_events_hour+ cHI_events_hour
	IAH sur temps de rampe	IAHr	IAH sur temps de rampe					
	IAH sur temps de fuite	IAHf	IAH sur temps de fuite					
	IAH hors temps de rampe et fuite	IAHt	IAH hors temps de rampe et fuite					
% de respiration periodique	RCS	Respiration périodique		respEvents CSR		PeriodicBreathingMinutes		portionOfPeriodicBreathing_percent
Fuites	Fuite moyenne en l/min	F Moy	Fuite moyenne l/min			AverageUnIntentionalLeak	AverageUnIntentionalLeak	
	Fuite moyenne totale en l/min	F Moy totale	Fuite Moyenne totale L/min (Philips)			Average Leak		
	Fuite moyenne "ventilation"	F Ven Moy	Fuites Moyenne L/min (Sleepinnov)					
	Fuite médiane en l/min	F Med	Fuite Médiane L/min (ResMed)	leakMedian	leak 50			leakageMedian_liter_min
	Fuite P90 en l/min	Fuite 90	Fuites au 90 décile L/min (SEFAM)			AverageUnIntentionalLeakLTE90		leakageP90_liter_min
	Fuite P95 en l/min	F 95	Fuites au 95 Décile L/min (ResMed)	leak95thPercentile	leak 95			leakageP95_liter_min
	% de fuite élevée	Fuite %	% (Loewenstein)			Total Large Leak Duration	LargeLeakMinutes	portionOfHighLeakage_percent
Pressions	Pression moyenne en cmH2O	P Moy	Pression Moyenne L/min (Philips)			PressureCPAP	AutoCpapMeanPressure	
	Pression médiane en cmH2O	P Med	Pression Médiane cmH2O (ResMed)	pressureMedian	tgtIPAP 50			pressureP50_cmH2O
	P 90 en cmH2O	P 90	Pression au 90ème Décile (Philips)			PressureCPAP90Pct	AverageCPAPDevicePressureLTE90	pressureP90_cmH2O
	P 95 en cmH2O	P 95	Pression au 95ème Décile (ResMed)	pressure95thPercentile	tgtIPAP 95			pressureP95_cmH2O
FR	Fréquence respiratoire moyenne	Fq Moy	Fréquence respiratoire Moyenne cycles/min (SleepInnov/Philips)			AverageBreathRate	AverageBreathRate	
	Fréquence respiratoire médiane	FQ	Médiane de la fréquence respiratoire par minute (ResMed)	respiratoryRate95thMedian	respRate 50			frequencyMedian_bpm
	Fréquence respiratoire P90	Fq 90	Fréquence respiratoire au 90ème Décile cycles/min (ResMed)					
	Fréquence respiratoire P95	FQ 95	Fréquence respiratoire au 95ème par minute (ResMed)	respiratoryRate95thPercentile	respRate 95			frequencyP95_bpm
Ti - Te - I/E - Respiratoire	% de respirations spontanées cyclées	TECS	% d'expiration spontanée (ResMed)	percentageSpontaneousCycledBreaths	spontCycledBreaths			
	% de respirations spontanées déclenchées	TCIS	% d'inspiration spontanée (ResMed)	percentageSpontaneousTriggeredBreaths	spontTriggBreaths			
	% moyen de respirations déclenchées par le patient	%Resp Moy	Pourcentage moyen de respirations déclenchées par le patient			AveragePctTriggeredBreath	AveragePctTriggeredBreath	
	% médian de cycles respiratoires avec Ti min	%TiMin	Pourcentage médian de cycles respiratoires avec Ti min					portionOfTiMin_percent
	% médian de cycles respiratoires avec Ti max	%TiMax	Pourcentage médian de cycles respiratoires avec Ti max					portionOfTiMax_percent
	% médian de cycles respiratoires avec Ti timed	%TITimed	Pourcentage médian de cycles respiratoires avec Ti timed					portionOfTITimed_percent
	% médian de cycles respiratoires contrôlés	%Resp Ctrl	Pourcentage médian de cycles respiratoires contrôlés					portionOfMandatoryBreaths_percent
	Volume courant moyen en ml	VC Moy	Volume courant moyen en ml Si en litres, 3 chiffres après la virgule.	Données VEN Sept2022		AverageExhaledTidalVolume	AverageExhaledTidalVolume	

Synthèse des données VEN fournies cf. 81107		is@Ddom		ResMed		Philips		Löwenstein
		Colonne	Info-bulle	XML	API	XML	API	
VC	Volume courant médian en ml	VC	Volume Courant Médian L (ResMed)	tidalVolumeMedian	tidalVol 50			tidalVolumeMedian_ml
	Volume courant P95 en ml	VC 95	Volume Courant au 95ème Décile L (ResMed)	tidalVolume95thPercentile	tidalVol 95			tidalVolumeP95_ml
VM	Volume minute moyen en l/min	DV Moy	Volume minute moyen en l/min			AverageMinuteVent	AverageMinuteVent	
	Volume minute médian en l/min	DV	Ventilation médiane L/min (ResMed)	minuteVentilationMedian	minuteVent 50			minuteVolumeMedian_l_min
	Volume minute P95 en l/min	DV 95	durée de ventilation au 95ème Décile L/min (ResMed)	minuteVentilation95thPercentile	minuteVent 95			minuteVolumeP95_l_min
EPAP	EPAP moyenne en cmH2O	P Expi Moy	Pression Expiratoire Moyenne cmH2O (Sleepinnov)			PressureEPAP	AutoEpapMeanPressure	
	EPAP médiane en cmH2O	PE	Pression Expiratoire Médiane cmH2O (ResMed)	expPressureMedian	tgtEPAP 50			epapMedian_cmH2O
	EPAP P90 en cmH2O	PE90	Pression expiratoire 90e centile en cmH2O			PressureEPAP90Pct	AverageIPAPDevicePressureLTE90	
	EPAP P95 en cmH2O	PE95	Pression Expiratoire au 95ème Décile cmH2O (ResMed)	expPressure95thPercentile	tgtEPAP 95			epapP95_cmH2O
IPAP	IPAP moyenne en cmH2O	P Inspi Moy	Pression Inspiratoire Moyenne cmH2O (SleepInnov)			PressureIPAP	AutoIpapMeanPressure	
	IPAP médian en cmH2O	P Inspi	Pression inspiratoire médiane en cmH2O	PressureMedian	tgtIPAP 50			ipapMedian_cmH2O
	IPAP P90 en cmH2O	P Inspi 90	Pression Inspiratoire au 90ème Décile cmH2O (SleepInnov)			PressureIPAP90Pct	AverageIPAPDevicePressureLTE90	
	IPAP P95 en cmH2O	P Inspi 95	Pression inspiratoire 95e centile en cmH2O	Pressure95thPercentile	tgtIPAP 95			ipapP95_cmH2O

Synthèse des données VEN fournies cf. 81107		Sefam			Commentaires
		Rampe	Fuite	Traitement	
Evènements	IAH actuel dans Isadom		leakObstructiveApneas+ leakObstructiveHypopneas+ leakCentralApneas+ leakCentralHypopneas	obstructiveApneas+ obstructiveHypopneas+ centralApneas+ centralHypopneas	
	IAH par heure sans hypopnées centrales	rampObstructiveApneas+ rampObstructiveHypopneas+ rampCentralApneas	leakObstructiveApneas+ leakObstructiveHypopneas+ leakCentralApneas	obstructiveApneas+ obstructiveHypopneas+ centralApneas	Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam faire la somme des 3 colonnes d'index
	IAH avec hypopnées centrales	rampObstructiveApneas+ rampObstructiveHypopneas+ rampCentralApneas+ rampCentralHypopneas	leakObstructiveApneas+ leakObstructiveHypopneas+ leakCentralApneas+ leakCentralHypopneas	obstructiveApneas+ obstructiveHypopneas+ centralApneas+ centralHypopneas	Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam faire la somme des 3 colonnes d'index
	IAH obstructifs	rampObstructiveApneas+ rampObstructiveHypopneas	leakObstructiveApneas+ leakObstructiveHypopneas	obstructiveApneas+ obstructiveHypopneas	Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam faire la somme des 3 colonnes d'index
	Index d'apnées obstructives	rampObstructiveApneas	leakObstructiveApneas	obstructiveApneas	Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam faire la somme des 3 colonnes d'index
	Index d'hypopnées obstructives	rampObstructiveHypopneas	leakObstructiveHypopneas	obstructiveHypopneas	Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam faire la somme des 3 colonnes d'index
	IAH centraux	rampCentralApneas+ rampCentralHypopneas	leakCentralApneas+ leakCentralHypopneas	centralApneas+ centralHypopneas	Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam faire la somme des 3 colonnes d'index
	Index d'apnées centrales	rampCentralApneas	leakCentralApneas	centralApneas	Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam faire la somme des 3 colonnes d'index
	Index d'hypopnées centrales	rampCentralHypopneas	leakCentralHypopneas	centralHypopneas	Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam faire la somme des 3 colonnes d'index
	Evènements non qualifiés				Nouvelle colonne Isadom
	Index d'apnées	rampObstructiveApneas+ rampCentralApneas	leakObstructiveApneas+ leakCentralApneas	obstructiveApneas+ centralApneas	Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam faire la somme des 3 colonnes d'index
	Index d'hypopnées	rampObstructiveHypopneas+ rampCentralHypopneas	leakObstructiveHypopneas+ leakCentralHypopneas	obstructiveHypopneas+ centralHypopneas	Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam faire la somme des 3 colonnes d'index
	IAH sur temps de rampe	rampObstructiveApneas+ rampObstructiveHypopneas+ rampCentralApneas+ rampCentralHypopneas			Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam uniquement les index sur rampe
	IAH sur temps de fuite		leakObstructiveApneas+ leakObstructiveHypopneas+ leakCentralApneas+ leakCentralHypopneas		Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam uniquement les index sur fuite
	IAH hors temps de rampe et fuite			obstructiveApneas+ obstructiveHypopneas+ centralApneas+ centralHypopneas	Nouvelle colonne Isadom, pour Sefam uniquement les index sur traitement
	% de respiration periodique				Nouvelle colonne Isadom, pour ResMed et Philips à convertir en %
Fuites	Fuite moyenne en l/min		leakResidualAvg		
	Fuite moyenne totale en l/min		leakAvg		Colonne à ajouter F Moy totale, libellé Fuite moyenne totale en l/min
	Fuite moyenne "ventilation"				
	Fuite médiane en l/min				Libellé Isadom à renommer Fuite médiane en l/min
	Fuite P90 en l/min		leakP90		Libellé Isadom à renommer Fuite 90e centile en l/min
	Fuite P95 en l/min				Libellé Isadom à renommer Fuite 95e centile en l/min
	% de fuite élevée		leakLimitDuration		Libellé Isadom à renommer Fuite importante en %, à convertir en % si remonte en minutes (Philips et Sefam), attention utilisée pour SFRMS en minutes pour Philips,% pour Löwenstein et % pour Sefam
Pressions	Pression moyenne en cmH2O		pressureAvg		Libellé Isadom à renommer Pression moyenne en cmH2O
	Pression médiane en cmH2O				Libellé Isadom à renommer Pression médiane en cmH2O
	P 90 en cmH2O				Libellé Isadom à renommer Pression 90e centile en cmH2O
	P 95 en cmH2O				Libellé Isadom à renommer Pression 95e centile en cmH2O
FR	Fréquence respiratoire moyenne				Libellé Isadom à renommer Fréquence respiratoire moyenne en Resp./min
	Fréquence respiratoire médiane				Libellé Isadom à renommer Fréquence respiratoire médiane en Resp./min
	Fréquence respiratoire P90				Libellé Isadom à renommer Fréquence respiratoire 90e centile en Resp./min
	Fréquence respiratoire P95				Libellé Isadom à renommer Fréquence respiratoire 95e centile en Resp./min
Ti - Te - I/E - Respirations	% de respirations spontanées cyclées				Libellé Isadom à renommer Pourcentage de respirations spontanées cyclées
	% de respirations spontanées déclenchées				Libellé Isadom à renommer Pourcentage de respirations spontanées déclenchées
	% moyen de respirations déclenchées par le patient				Nouvelle colonne Isadom
	% médian de cycles respiratoires avec Ti min				Nouvelle colonne Isadom
	% médian de cycles respiratoires avec Ti max				Nouvelle colonne Isadom
	% médian de cycles respiratoires avec Ti timed				Nouvelle colonne Isadom
	% médian de cycles respiratoires contrôlés				Nouvelle colonne Isadom
	Volume courant moyen en ml				Nouvelle colonne Isadom, libellé Isadom à renommer Volume courant moyen en ml Données Philips en mm Si en litres, 3 chiffres après la virgule.

Synthèse des données VEN fournies cf. 81107		Sefam			Commentaires
		Rampe	Fuite	Traitement	
VC	Volume courant médian en ml				Libellé Isadom à renommer Volume courant médian en ml Si en litres, 3 chiffres après la virgule.
	Volume courant P95 en ml				Libellé Isadom à renommer Volume courant 95e centile en ml Si en litres, 3 chiffres après la virgule.
VM	Volume minute moyen en l/min				Nouvelle colonne Isadom, libellé Isadom à nommer Volume minute moyen en l/min
	Volume minute médian en l/min				Libellé Isadom à renommer Volume minute médian en l/min
	Volume minute P95 en l/min				Libellé Isadom à renommer Volume minute 95e centile en l/min
EPAP	EPAP moyenne en cmH2O				Libellé Isadom à renommer Pression expiratoire moyenne en cmH2O
	EPAP médiane en cmH2O				Libellé Isadom à renommer Pression expiratoire médiane en cmH2O
	EPAP P90 en cmH2O				Nouvelle colonne Isadom, libellé Isadom à nommer Pression expiratoire 90e centile en cmH2O
	EPAP P95 en cmH2O				Libellé Isadom à renommer Pression expiratoire 95e centile en cmH2O
IPAP	IPAP moyenne en cmH2O				Libellé Isadom à renommer Pression inspiratoire moyenne en cmH2O
	IPAP médian en cmH2O				Nouvelle colonne Isadom, libellé Isadom à nommer Pression inspiratoire médiane en cmH2O
	IPAP P90 en cmH2O				Libellé Isadom à renommer Pression inspiratoire 90e centile en cmH2O
	IPAP P95 en cmH2O				Nouvelle colonne Isadom, libellé Isadom à nommer Pression inspiratoire 95e centile en cmH2O